DropTapとiOAKでおしゃべり

非接触型スイッチでDropTapを操作する

使用機器およびセッティング

使用機器・アプリ等









L

iPad の 事 前 準 備

できiPad2。iPadとのペアリング



https://youtu.be/IPU2DDt3JOg





	部品	単価 (税込)	入手先		
1	モノラルジャック MJ-355	¥80	秋月電子通商など		
2	電池ボックス BH-331-3A 単3×3本 リード線	¥70	https://akizukidenshi.com/		
3	銅テープまたはアルミテープ	¥110~	100均または ホームセンターなど		







電池ボックスの加工(2)



ここを銅テープで橋渡し





くらいの穴をあける

電池ボックスの準備





iOAK & Mabeee

iOAKの設定

Oak

				~	MaBeee		
		モーションヒストリー		MaBeeeA02087		49 🗙	
		映像の重ね合わせ					
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	自動撮影					
	< رې برې	\$ 時間間隔 (秒ごと)	10	表示で	されたMab	eeet	
		シャッター音		クップ			
		説明ラベル					
		エアスイッチ					
		出力	なし >	<mark>一</mark> 出力→	⁻ Mabee	e」を選打	尺
		ON · OFF					
		ショット	✓	ON	• OFF → I	ショット」	J
		ラッチ					
ビストリー		無反応時間 (秒)	1.0				
<i><b>クリア</b></i>	<u>`</u>	音		-	音を設定して	おくとスー	イッチ
		なし	~		入力を設定し	た音で研	隺認
		クリック		-	できます。		
		ベル			-		



#### エアスイッチの調整 四角をドラッグして **iOAK** 位置を変更したり、 四隅をドラッグして 大きさを変更できます エアスイッチを ON エアスイッチ 緑の四角の範囲内で 動きを検知すると スイッチが入ります エアスイッチ 動き検知の感度は ここで調節します (Ô) [÷]

DropTap





## 外部スイッチの設定

17:34 1月13日(月 全画面			0.0	0.0			
編集	フォルダ	זאנע עשוי	ビンク オレンジ	1ID- 4	17:33 1月13日(月) とじる	···· :小中	<b>२</b> 100% 💋
			すべてのボー	×.		設進	
				and (	▶ 読み上けホタンの動作		シンホルを順に冉生◇
		???	23 19 19 19		(ナ) センテンスボードにシンボルを追加する	る時の読み上げ	なし≎
					ふシンボルを順に再生するときのテンポ	ر ۲	ふつう ≎
	(ノーマル) じゃん 0.1 MB↓ 0	んけん(?) す 0.1 MB	田間に来り これ GO! とも7 1.8 MB	-514 J にち ごちだ 5.8 MB	※ シンボルを全て読み上げた後にクリア	2	オフ≎
		protection (			🖴 シンボルの下にラベルを表示		オン≎
					5.アクセシビリティ		
	高等部選択音楽新し	ルボード	うた 新	いボード	ボードを全画面モードで開く 操作スペースが広がる他、チャイルドロックとしても機能します		
Drops	414.2 MB 0.	1 MB↓	2.1 MB 0		🔊 タッチに反応するタイミング		触ったとき☆
設定					□ 外部スイッチ		オンロ
					6.その他の機能		
					▶ ログ(記録)		オン >
					戸 ストア		>

## 外部スイッチの設定

17:33 1月13日(月)	000	<b>रू</b> 100% 💋	
	外部スイッチ		
□ 外部スイッチを使用する			
シンプルモードでコミュニケーションボードを再生する場合の その他の画面やセンテンスモードをスイッチ操作したい場合は	み、外部スイッチに対応しています。 、OS標準のスイッチコントロールをお試しください。		
スイッチ入力に反応するタイミン スイッチインターフェースにより正しく動作しない場合が	<b>グ</b> あります	スイッチを押したとき≎	
□1 動画を閉じる操作		再生終了時に自動で閉じる≎	ステップスキャン
動作モード			✓オ−トスキャン
□ シンボルが1つのとき		全てのスイッチ入力で再生	ダイレクトプレイ
シンボルが2つ以上のとき			
ステップスキャン:カーソルの移動と決定の操作で再生し オートスキャン:カーソルが自動で移動し、決定の操作で ダイレクトプレイ:スイッチごとに特定のシンボルを再生し	します で再生します します	オートスキャン≎	
② カーソルの移動速度		0.5秒 - +	い西に広いて
[] カーソルの色		レッド ≎	必安に応しし
<b>⑤</b> 再生後のカーソル位置		つづきから始める≎	設定
キー割り当て			

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

#### スイッチをアクティブにして開始

 $\bullet$ 

![](_page_21_Picture_1.jpeg)

(c)

![](_page_21_Picture_3.jpeg)

![](_page_21_Picture_4.jpeg)

![](_page_21_Figure_5.jpeg)