

スイッチラッチ&タイマー デュアル

ablenet®

取扱説明書

この度は「スイッチラッチ&タイマー デュアル」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく
お読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

**k** パシフィックサプライ株式会社

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。

※必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

「スイッチラッチ&タイマー デュアル」の特徴

「スイッチラッチ&タイマー デュアル」とは…

- スイッチラッチ&タイマー デュアルは、スイッチ（別売）を使用して、接続したおもちゃなど（別売）を制御する機器です。
- 1-60秒あるいは、1-60分内での任意の制御と、ラッチ（交互）制御の3種類のモードがあります。
- 2つのスイッチと2つの機器を接続できます。モードは個々に設定はできません。スイッチ1と出力1が、スイッチ2と出力2が対応して動作します。1つのスイッチで2つの出力を制御することはできません。



もくじ

1. 安全にご使用いただくために	4
2. 各部の名称・仕様	6
3. 使用方法	7
4. お手入れ・保管・廃棄方法	9
5. 保証書	10

1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用中に異音や異臭、機器からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1-3 注意に関する事項




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
 - (1)直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
 - (2)冷暖房機・加湿器のそば
 - (3)水に濡れやすい場所
 - (4)振動のある場所
- 濡れた手で本製品に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。
- 本製品本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や故障の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。
- 酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。
- 本製品の内容については改良の為予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません、またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2.各部の名称・仕様

2-1 構成部品と各部の名称

「スイッチラッチ&タイマー デュアル」は次の部品で構成されています。
付属品に不足はないかご確認ください。

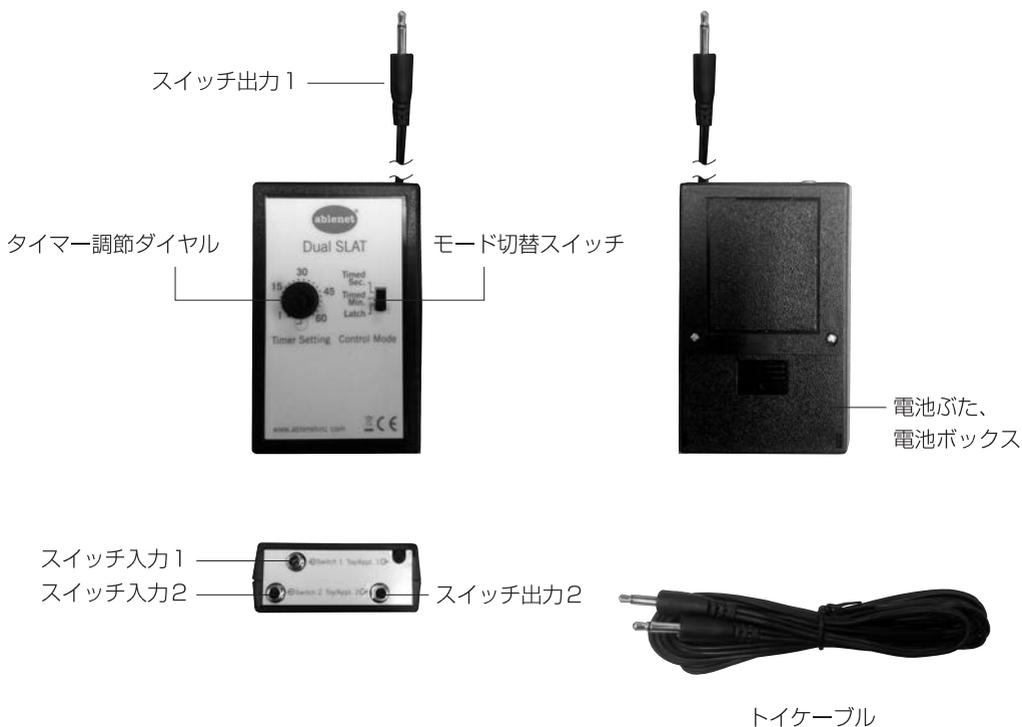

※動作の為に他に必要なもの（別売）

スイッチ、アルカリ乾電池9V形、スイッチで動作する機器（おもちゃ等）

2-2 製品仕様

名称	仕様	
スイッチラッチ&タイマー デュアル	サイズ	60×95×25mm 突起部除く
	重量（電池なし）	106g
	電源	アルカリ乾電池9V形

3.使用方法

3-1 ご使用前に



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用中に異音や異臭、機器からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3-2 電池の取り付け



- ・本体裏面の電池ぶたを開ける。
 - ・アルカリ乾電池9V形（別売）を取り付け、電池ぶたを閉める。
- * 電池が収納し辛い際には、電池取り付け後、金具側からボックス内に入れてください。



3-3 接続



スイッチ（別売）をスイッチ入力1かスイッチ入力2へ接続する。

スイッチで動作する機器をスイッチ出力1かスイッチ出力2へ接続する。

* スイッチ入力1とスイッチ出力1、スイッチ入力2とスイッチ出力2がそれぞれ対応します。

スイッチ出力2を利用する際は、付属のトイケーブルをお使いください。

* スイッチで動作する機器とは、BDアダプター（弊社製、別売）を取り付けた市販のおもちゃや、スイッチジャックが取り付けられたおもちゃ、電源リレー（弊社製、廃盤品）などです。

3-4 設定

本製品は、スイッチの入力を、3つのモードで出力制御できます。

モード	制 御	設定方法
タイマー 秒	スイッチを操作すると、機器は設定時間（1-60秒）に応じて動作する。	モード切替スイッチを【Timed Sec.】に合わせ、タイマー調節ダイヤルで希望の時間に合わせる。
タイマー 分	スイッチを操作すると、機器は設定時間（1-60分）に応じて動作する。	モード切替スイッチを【Timed Min.】に合わせ、タイマー調節ダイヤルで希望の時間に合わせる。
ラッチ	スイッチを操作すると機器が動作し、動作中にスイッチを操作すると機器が止まる。	モード切替スイッチを【Latch】に合わせる。

3-5 使用

スイッチを操作すると、3-3、3-4にて接続、設定した内容に合わせて、機器が動作します。



接続例

4. お手入れ・保管・廃棄方法

- 本製品のお手入れの際は、まず接続されているスイッチ、機器を全て外してください。
- 固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には保管しないでください。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

5.保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	スイッチラッチ&タイマー デュアル			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)	TEL		
	お名前			
お買い上げ日 西暦 年 月 日				
販売店名				
保証期間	2年間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明の場合、弊社またはご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。

6. ㄨㄜ

● 輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2016.01