


目や口などの動きでクリックする 方法

動きを捉えるソフトウェア

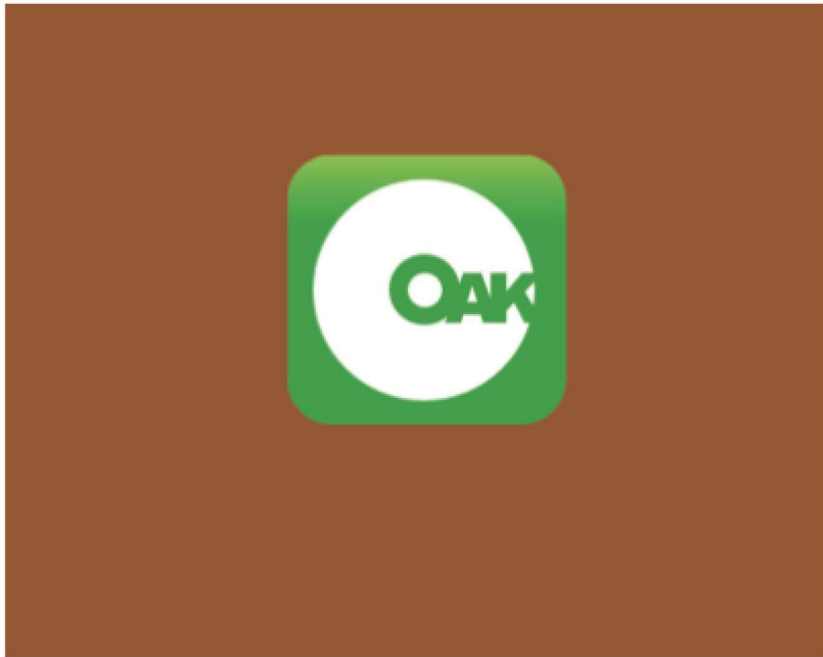

OAK Cam


Observation and Access with Kinect
Camera Edition

OAK Cam (ATAC LAB)


価格:¥33,000

重度・重複障害など、随意的な動きをとらえることが難しい人の反応を可視化したり、わずかな動きによるスイッチ操作を可能にするソフトウェア


セッティング例(仰向け姿勢の場合)

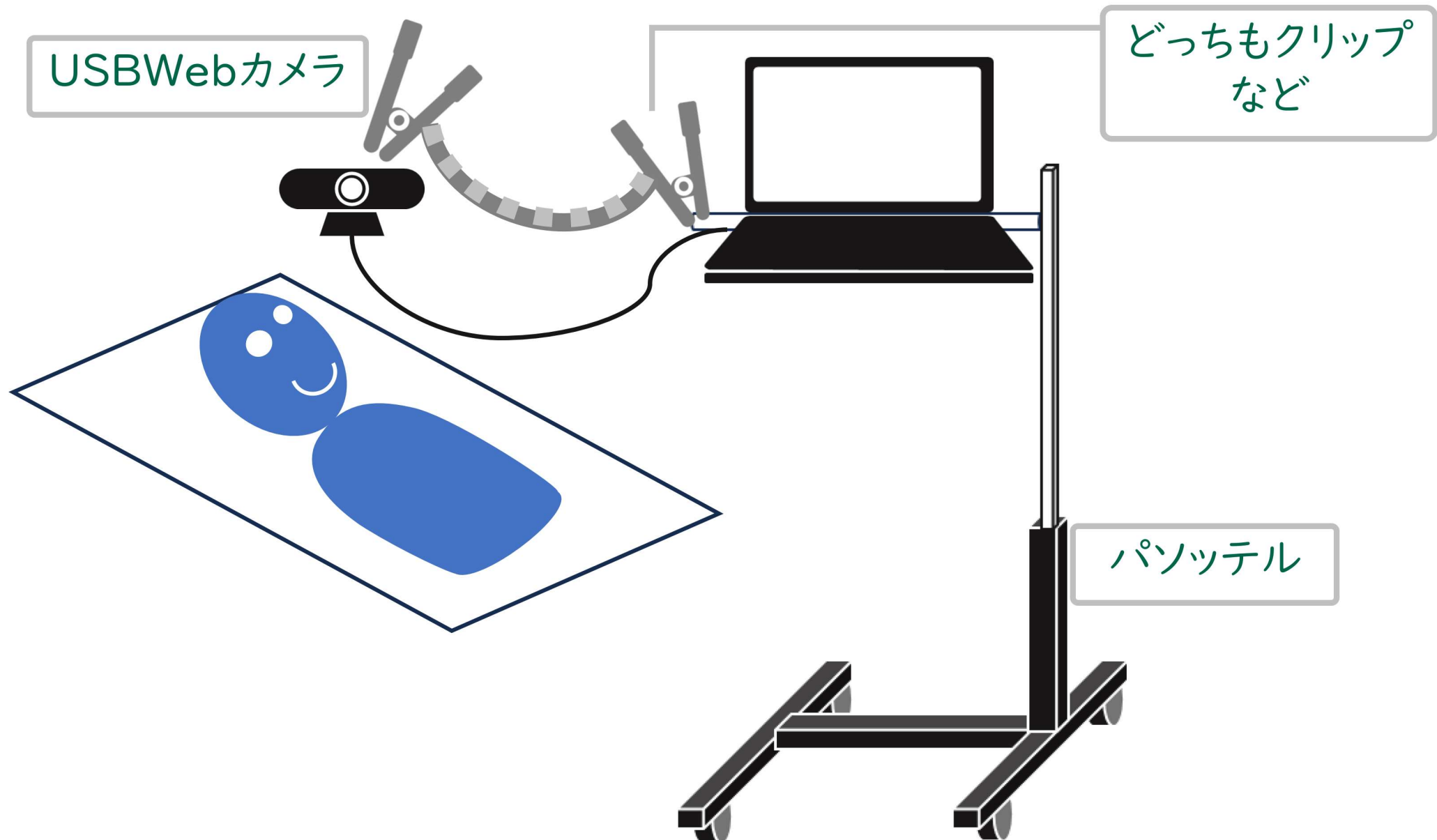


OAK Camの起動

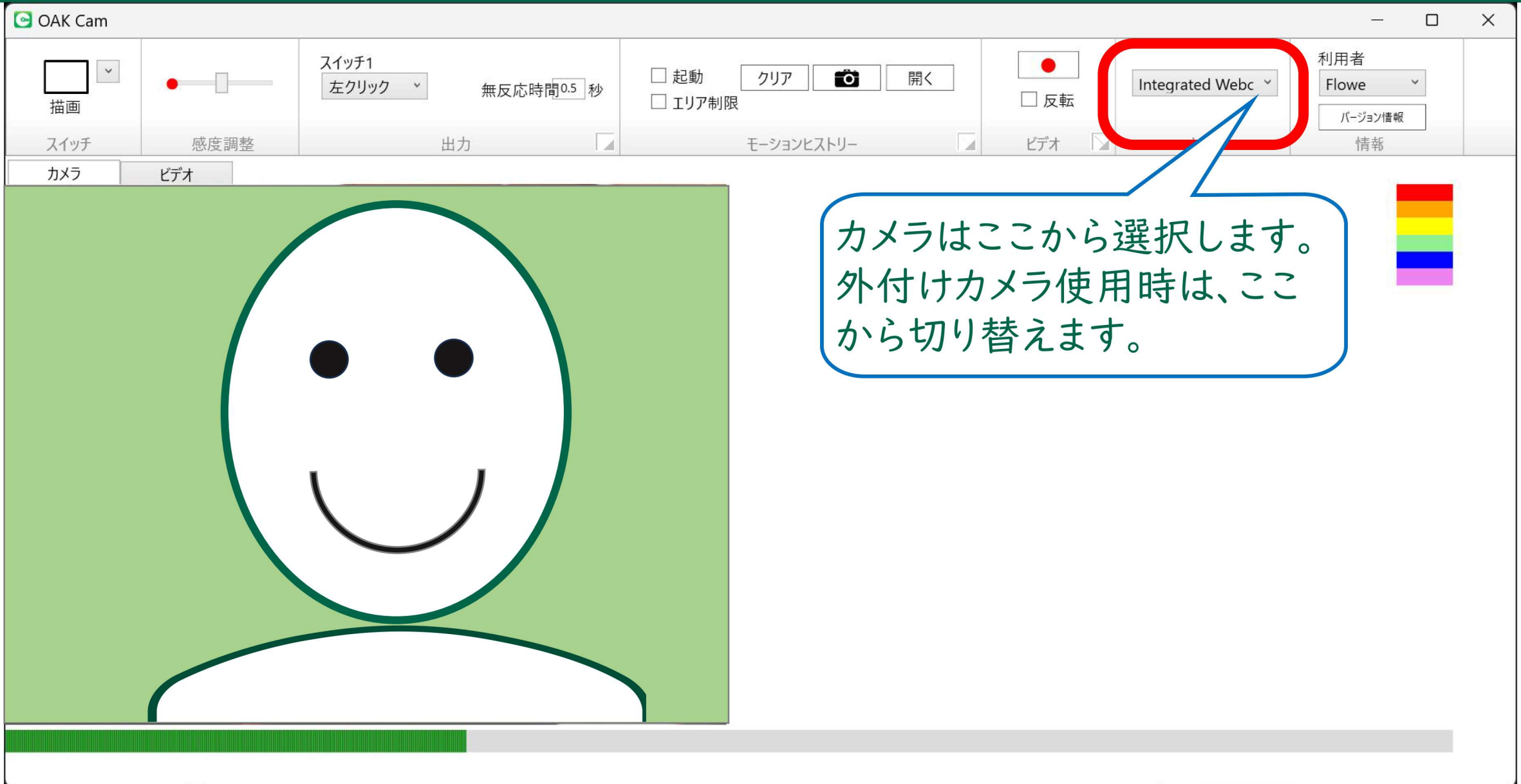

エアスイッチの設定

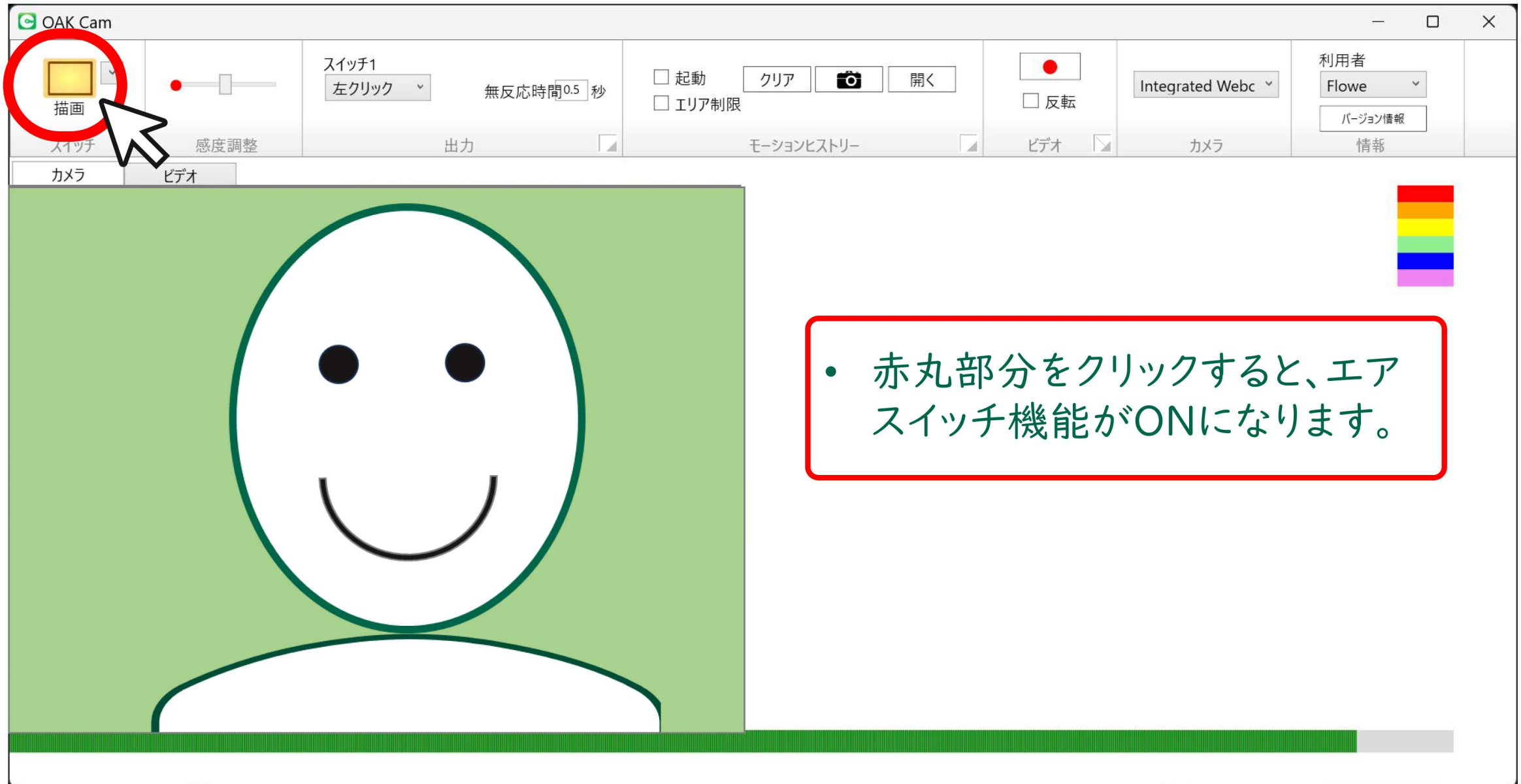

エアスイッチの位置と範囲を設定

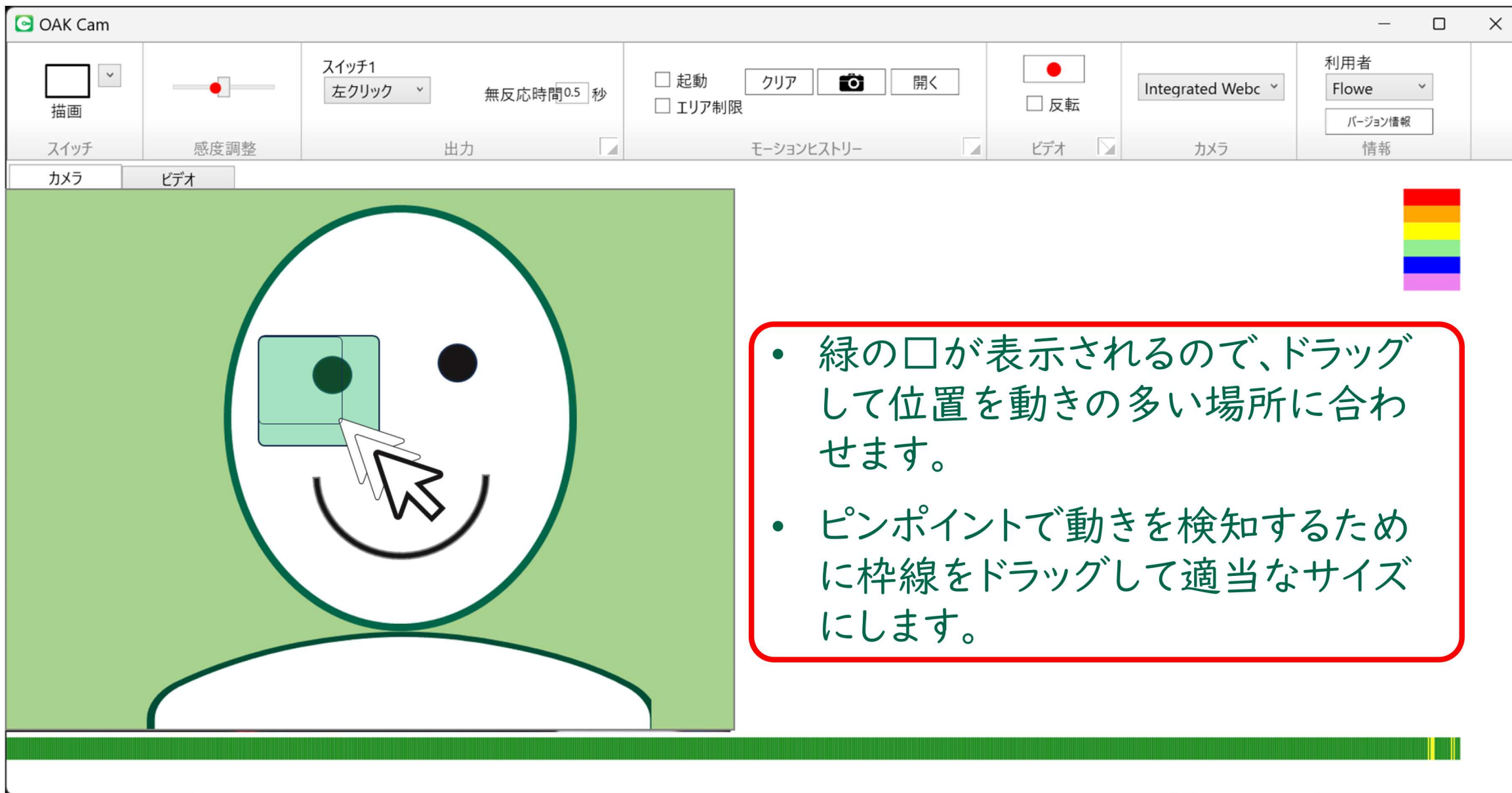

OAK Cam

描画
スイッチ

感度調整

スイッチ1
左クリック

無反応時間 0.5 秒

出力

☐ 起動
☐ エリア制限

クリア

開く

☐ 反転

Integrated Webcam

カメラ

ビデオ

モーションヒストリー

カメラ


ビデオ

利用者
Flowe


バージョン情報
情報

- 緑の□が表示されるので、ドラッグして位置を動きの多い場所に合わせます。
- ピンポイントで動きを検知するために枠線をドラッグして適当なサイズにします。

スイッチON状態

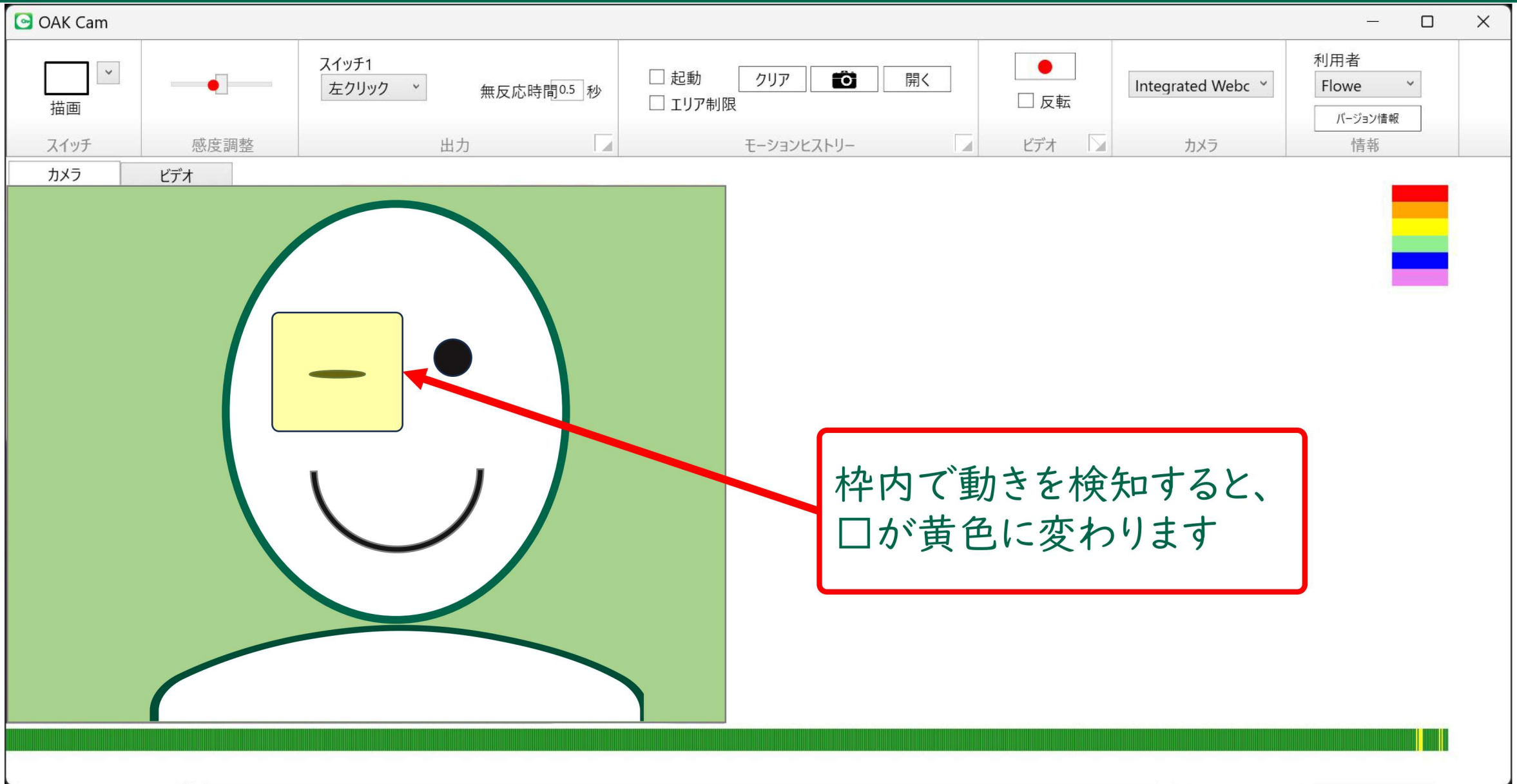

動き検出の感度と機能の割り当て

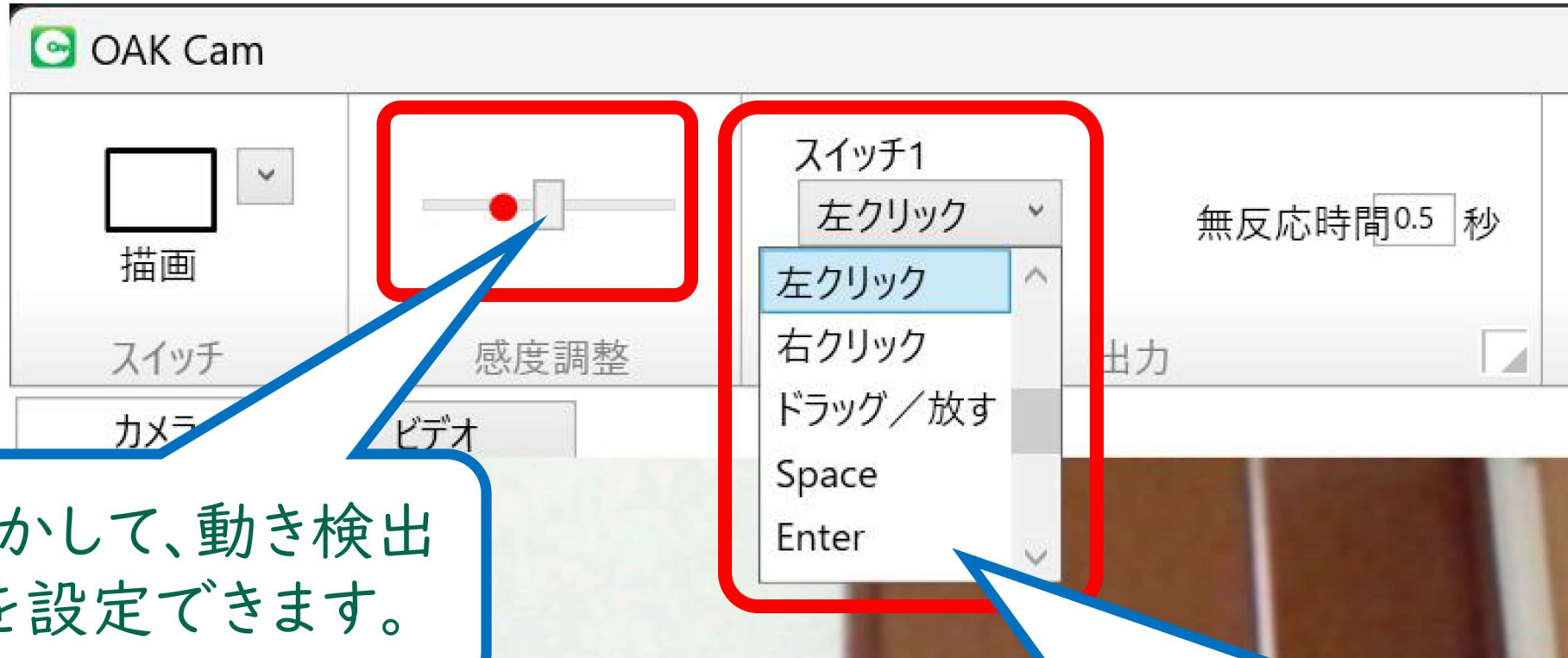

バーを動かして、動き検出の感度を設定できます。

スイッチON時の機能を割り当てます(ここでは左クリック)。

使い方



設定が終わったら、ソフトは起動したまま、各種アプリを使用します。

OAK Camは最小化しておけば邪魔になりません。