


スーパートーカー

ablenet®

取扱説明書

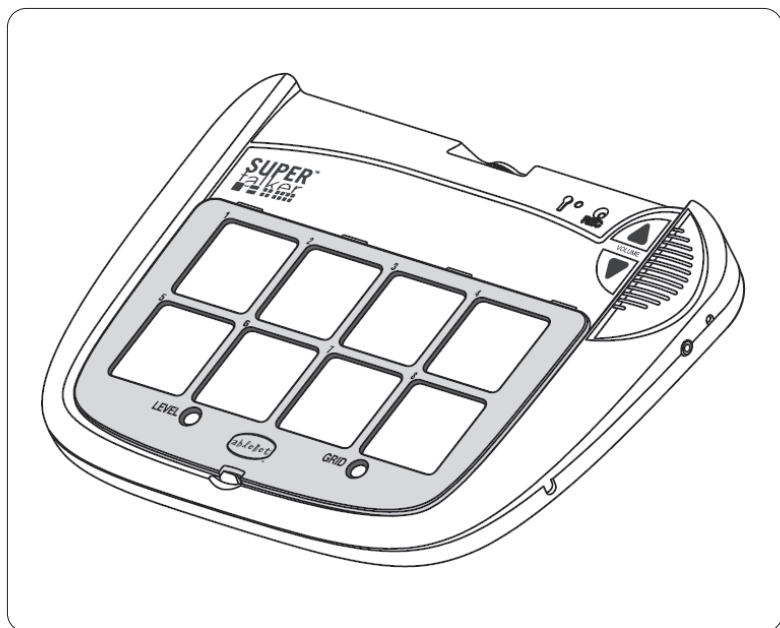

この度は「スーパートーカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

※製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

R パシフィックサプライ株式会社

「スーパートーカー」について

「スーパートーカー」とは…

- 最大キー分割数8分割、8レベル(場面)までのメッセージを録音・再生できるVOCA (Voice Output Communication Aid) です。
16分間音声を録音・再生できます。
- キー分割は1・2・4・8分割の中からユーザーに応じたものを選択できます。
- 各キーに対応したスイッチ接続ジャック(ダイレクト)にスイッチを接続することができます。
- スイッチ接続ジャック(ステップ)にスイッチを接続すると、押す毎に1番キーから順番にメッセージを再生することができます。
- 1番・2番キーは外部出力が可能ですので、電池で動くおもちゃなどを操作することができます。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために	3
2. 各部の名称と仕様	5
3. 使用方法	6
4. お手入れ・保管・廃棄	8
5. メッセージ例	9
6. 保証書	10
付録オーバーレイシート	11

1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品を生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。
- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。
- 使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。

1-3 注意に関する事項




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
 - (1)直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
 - (2)冷暖房機器・加湿器のそば
 - (3)水に濡れやすい場所
 - (4)振動のある場所
- 濡れた手で本製品に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。
- 本製品本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。
- 酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2.各部の名称と仕様

2-1 構成部品と各部の名称

本製品は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

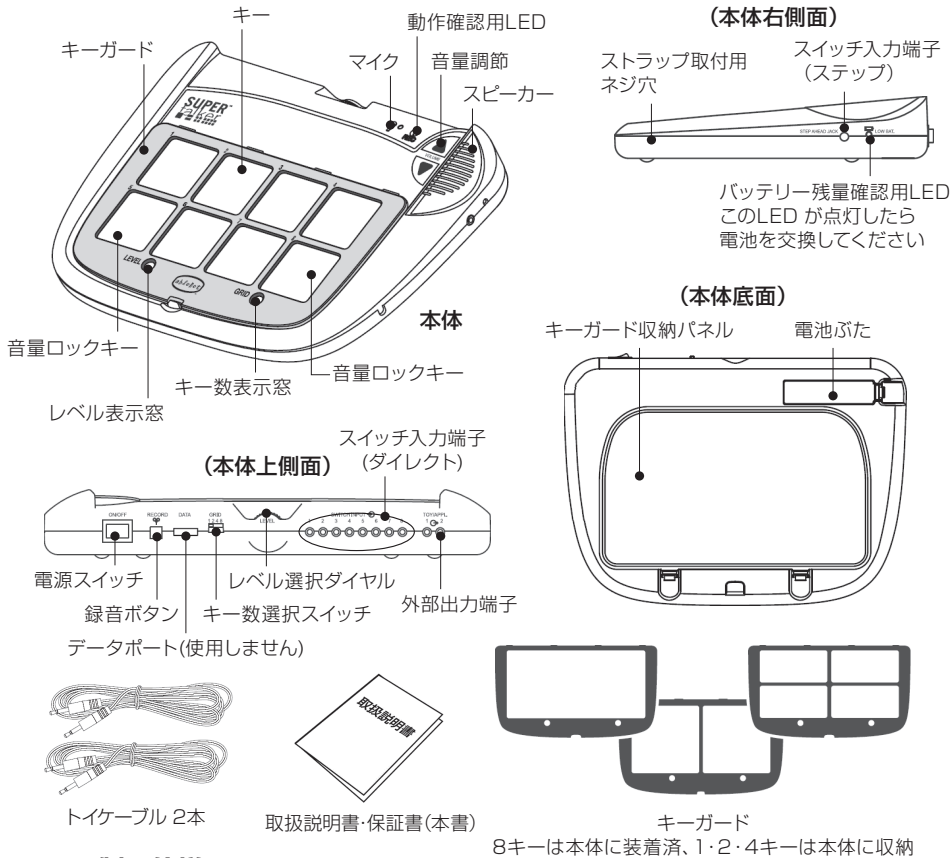

2-2 製品仕様

部分名称	仕 様	
スーパートーカー 本体	高さ×幅×奥行	約48×310×225(mm)
	重量	約950g
	キー数	最大8 キー (1・2・4・8 キーに変更可能)
	録音時間	合計16分
	スイッチ入力／外部出力	3.5mm モノラルジャック
	電源	アルカリ乾電池単3形 4本
	再生時間	約25時間
		2分間の音声を約750 回再生可能 10秒間の音声を約9000 回再生可能

3.使用方法

3-1 使用する前に



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品を生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。
- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。
- 使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



注意


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本書の注意に関する指示事項には必ず従ってください。

3-2 電池の取り付け


本体底面の電池ぶたを開けます。

+と-の極性に注意してアルカリ乾電池9V形を取り付けて、電池ぶたを閉めてください。

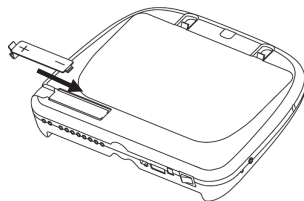


3-3 本体の電源をONにする

本体上側面の電源スイッチをON にします。

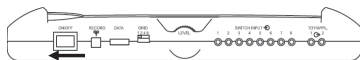

3-4 録音方法

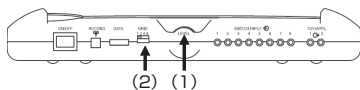


- (1)使用するレベルを決め、本体上側面のレベル選択ダイヤル(1～8)を選択します
- (2)使用するキー数を決め、本体上側面のキー数選択スイッチ(1・2・4・8)を選択します。
本書付録のオーバーレイシート(原版)より適切なものを選びコピーを取り点線部分を切り抜いてください。
(1)で決めたレベルをコピーしたオーバーレイシートの「LEVEL」横の円の中に記入してください。
- (3)(2)で作ったオーバーレイのキー数に応じたキーガードに付け替えてください。
使用しないキーガードは本体底面のキーボード収納パネル内に収納することができます。
- (4)本体上側面の録音ボタンを動作確認用LED が赤く点灯するまで押し続けてください。
点灯すると「録音モード」になります。
- (5)キーを押している間、音声録音されます。録音されている間、動作確認用LED は赤く点滅します。
各キーに録音を行なってください。
- (6)「録音モード」を終了するには録音ボタンを1回押してください。

● 録音時の注意 ●

- 口とマイクの距離は30～50cm 離してください。口とマイクが近すぎると再生の際、音声割れることがあります。
- 録音可能時間が2分を切ると動作確認用LEDの点灯・点滅が赤から黄に変わります。
- 先に録音したキー数と異なるキー数で録音を行なった場合、そのレベルに録音されていた音声は全て削除されます。
- 録音モードに入ったら20秒以内に録音を行なってください。録音モードで20秒間操作が行なわれない場合、自動的に録音モードが終了します。

3-5 再生方法

- (1) 使用するオーバーレイに記載されているレベル・キー数を確認し、レベル切替ダイヤル・キー選択スイッチを合わせます。また、キーガードもキー数にあったものに付け替えます。
- (2) キーを押すと録音した音声再生されます。

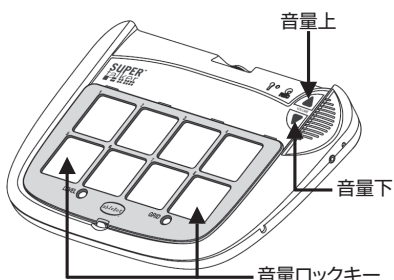

<1> 音量の調整

音量は音量ボタンを操作して調節してください。音量ボタンを押すと動作確認用LEDが黄で点灯します。

音量が最大・最小になった場合、上向き三角(最大時)、下向き三角(最小時)が書かれた音量ボタンを押すと動作確認用LEDが赤く点灯します。


一定の音量を保持(ロック)したい場合は音量ロックキー(8キーの5番キーと8番キー)を同時に押してください。

音量がロックされている間は、音量ボタンを押しても音量は変わりません。また、音量がロックされている間は音量ボタンを押すと赤く点灯します。

音量のロックを解除したい場合も音量ロックキーを同時に押してください。

スイッチの反応について

本機のキーガード部分の下は、キーガード自体を押してしまった際にキー表面が反応し、誤って再生されてしまうことを防ぐため、押しても反応しないように設計されています。1、2、4キーでご利用の際にはご注意ください。

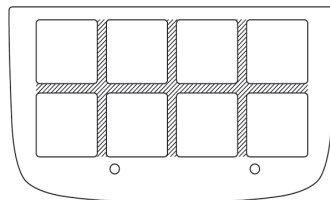

※斜線部分が反応しにくくなっております。

<2> 外部スイッチを用いて操作を行なう場合

キーを押すことが難しい場合、外部スイッチを用いて本製品を操作することが可能です。外部スイッチを用いた操作方法は各キー毎にスイッチを接続する「ダイレクト入力」と、スイッチを押すと1 番キーから順番に再生される「ステップ入力」の2 種類があります。

1) ダイレクト入力

- スイッチを本体上側面の「スイッチ入力端子(ダイレクト)」に接続します。
- スイッチは各キーの左上に付いているキー番号に対応しており、スイッチを押すと対応したキーに録音されている音声再生されます。
- 最大で8 個のスイッチを用いて音声の再生を行なうことが可能です。

2) ステップ入力

- スイッチを本体右側面の「スイッチ入力端子(ステップ)」に接続します。
- 最初にスイッチを押すと1 番キーの音声再生されます。
もう1 度スイッチを押すと2 番キーの音声再生されます。
最終キー(一番右下のキー)まで再生されると、1 番キーに戻ります。
- 1個のスイッチだけでの操作が可能です。順番に音声再生される特徴を活かした活動への使用も可能です。

3) 電動おもちゃなどを動かしたい場合

1 番キー、2 番キーの音声再生されている間、外部出力端子に接続している電池で動くおもちゃなどを動かすことが可能です。

(電動おもちゃとの接続にはトイケーブルやBD アダプター(別売)などをご使用ください)

3-6 電池交換

本体右側面にあるバッテリー残量LED が点灯した場合、電池が消耗している合図です。電池を新しいものに交換してください。

3-7 全メッセージの消去(初期化)

録音ボタンを、動作確認LED が赤く点灯し黄に変わるまで押し続けてください。

本製品に録音されているメッセージが全て消去され、出荷時と同様の状態となります。

4. お手入れ・保管・廃棄

- 本製品のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

5.メッセージ例

5-1 1キー「テーマを決める」

- 目的：授業や活動の内容に見通しを持てるように内容(テーマ)を説明する。
- 準備：(1) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
(2) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：読書の時間「これからお話を読みます。さあ、みんなでまろくなって座って」
理科の時間「今日の理科の授業は実験だからとっても楽しいよ！」
- 使用方法：子どもがキー(または外部スイッチ)を押してメッセージを再生し活動を説明します。

5-2 2キー「選択する」

- 目的：2つの活動から1つを選択する機会を与える。
- 準備：(3) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
(4) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：図工の時間「青い紙を使おう！」「赤い紙を使おう！」
理科の時間「僕は薬品を入れます」「僕はかき混ぜます」

5-3 4キー「参加する」

- 目的：活動の中で人とコミュニケーションする機会を提供する。(意見を言う・質問するなど)
- 準備：(5) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
(6) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：読書の時間(内容について)「この本大好き」・
(指示)「ページをめくって」
(質問)「このページの中には誰がいる？」・
(意味について)「このページで一番小さいものは何？」

5-4 8キー「コミュニケーションする」

- 目的：学校や施設、生活の中でコミュニケーションする。(持っている情報を共有する)
- 準備：(7) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
(8) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：メッセージ1：注意を引く「ねえねえみんな聞いて！」
メッセージ2：会話の開始「準備はいい？」
メッセージ3：大まかな話を伝える「今日学校で楽しいことがあったよ」
メッセージ4：質問「何か当ててみて」
メッセージ5：質問「この本と関係があるんだ！分かる？」
メッセージ6：質問「惜しい！！もう1回考えてみて」
メッセージ7：ヒントの提供「近くに来て。ヒントをあげるから」
メッセージ8：情報の共有「今日は本を読んだよ。僕はページをめくる役だったよ！」

6.保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。


品名	スーパートーカー				
お客様	ご住所 〒		TEL		
	(フリガナ)				
	お名前				
お買い上げ日 西暦 年 月 日					
販売店名					
保証期間	2年間				

- 「お買い上げ日」「お客様」「販売店」に記載のない場合は、無効となります。必ず有無をご確認ください。もし、記載がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間が過ぎた後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無料修理致します。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各消耗品及び各部の劣化による故障、損傷は除きます。
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、販売店および弊社営業所にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無料修理致します。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様ご負担とさせていただきます。
(保証規程6.の場合を除く)

付録 オーバーレイシート 1キー

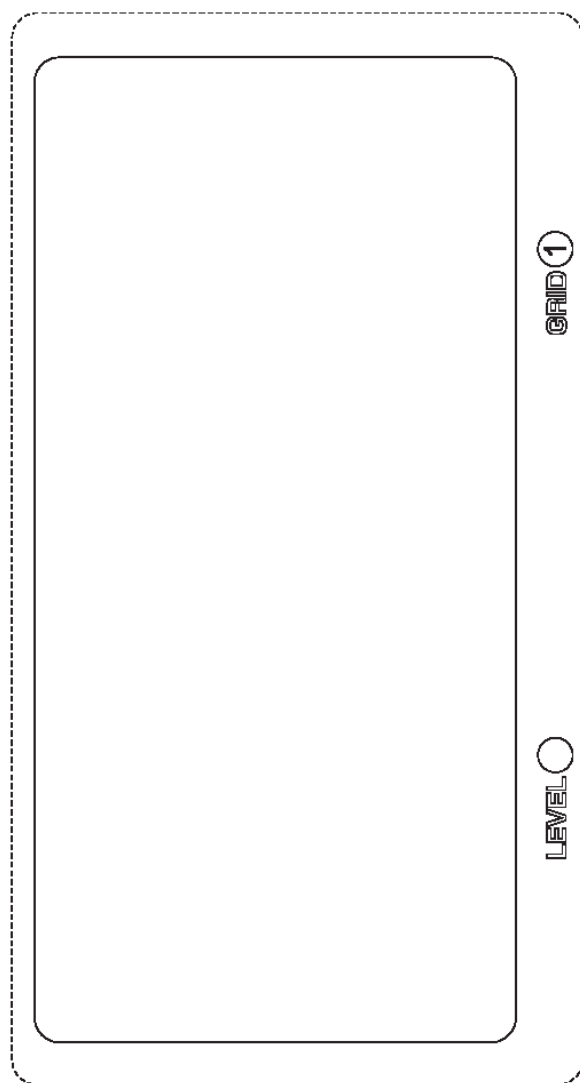


付録 オーバーレイシート 2キー

GRID 2

LEVEL 0

付録 オーバーレイシート 4キー

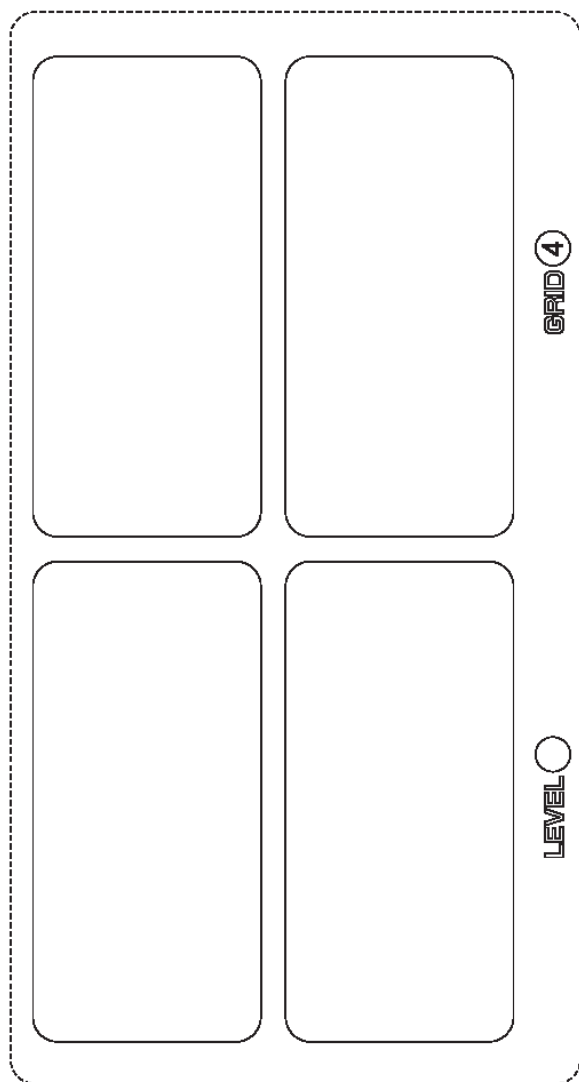

付録 オーバーレイシート 8キー

		GRID 8
		LEVEL 0

●販売元



本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店